

Title SÄKERHETSMEDDELANDE – Duschstol Snurren	ID GD 2025-267	Ver 01
--	-------------------	-----------

SÄKERHETSMEDDELANDE – Duschstol Snurren

Produktnamn:	Duschstolen Snurren
Datum:	2025-10-30
Till berörda parter:	Swerecos kunder
Säkerhetsåtgärd:	Produktens bruksanvisning har uppdaterats (Art.nr 142210,142211, 142180, 142181)

Information om berörda produkter

Duschstolen Snurren är avsedd att sitta på vid duschning. Sitsen kan vridas 360 grader och spärras automatiskt var 90:e grad med en spärr. För att lossa spärren trycks den fjädrande spaken ned med ett lätt tryck. Spaken kan lätt flyttas till motsatt sida.



Figur 1. Duschstolen Snurren

Anledning till korrigerande säkerhetsåtgärd på marknaden

Det har kommit till vår kännedom att spaken för låsning och justering på Snurren vid ett par tillfällen har tagits bort. När spaken avlägsnas upphör låsningen mellan Snurrens överdel och underdel. Detta är en avsiktlig funktion som möjliggör att produkten kan snurra, men innebär samtidigt att om låsmekanismen inte är på plats och om överdelen lyfts, finns inget som håller ihop produktens delar sits, chassi och plastbricka. Detta är inte ett produktfel. Vi bedömer risken för skada på brukare som mycket låg. Produkten är inte avsedd att flyttas med brukaren sittande och om låsspaken avlägsnas finns därför ingen situation där brukaren riskerar att falla. Det har inte rapporterats några tillbud kopplade till detta och funktionen är en avsiktlig del av produktens konstruktion

Åtgärder för att minska risken

Bruksanvisningen har uppdaterats med information om att låsspaken håller ihop över- och underdel. Uppdaterad bruksanvisning bifogas detta FSN.

Spridning av detta säkerhetsmeddelande

Vidarebefordra detta säkerhetsmeddelande till alla berörda personer inom din organisation och andra relevanta aktörer. Vid tillbud eller misstänkt funktionsfel ska detta omgående rapporteras till tillverkaren och, vid allvarliga incidenter, även till relevant myndighet enligt gällande regelverk. Bekräfta mottagandet av detta säkerhetsmeddelande via e-post: order@swereco.com

Tillverkarens information

Kontaktuppgifter till lokal representant		
Namn	Cecilia Nillroth (PRRC)	Conny Fridell (Produktchef)
E-mail	cecilia.nillroth@swereco.com	conny.fridell@swereco.com
Telefon	+46 (0)708 638 132	+46 (0)702 106 609
Adress	Vagnvägen 4, 364 42 Lenhovda	

Godkännande

Undertecknad bekräftar att detta meddelande har meddelats till lämplig tillsynsmyndighet.

DocuSigned by:
Hadi Ghane
5EAA85525CFC446...
Hadi Ghane VD
Datum: 2025-11-25

Ver	Ändring	Har riskutvärdering av ändring gjorts? (Ja/Nej/NA)	Har ändring regulatorisk betydelse på QMS/produkt? (Ja/Nej/NA) (doc om Ja)	Författare	Datum för ändring
01	Första utgåvan.	N/A	N/A	Cecilia Nillroth	2025-11-24