



Isbad

Vissa prover ska läggas i isbad direkt efter provtagning för att hållas kalla.

Ett isbad görs enligt följande:

- Ta en bägare, fyll den med kallt vatten och några isbitar.
- Provröret märks med namn och personnummer eller Cosmicetikett.
- Placera röret/rören i isbadet för kylning innan provtagning, provrör kan även kylas i kylskåp.
- Ta provet och vänd 10 gånger.
- Provet stoppas därefter i en plasthandske som placeras i isbadet.
- Transportera omgående provet till laboratoriet.