

Anvisningar venprovtagning vid kryoglobuliner/köldantikroppar

Viktigt att provtagning och hantering sker i 37°C med obruten värmekedja fram till analys när patienter misstänks ha kryoglobuliner/köldantikroppar. Venös provtagning vid Laboratoriemedicin Östersund. (I undantagsfall på avdelning efter instruktioner av laboratoriepersonal.)

Venprovtagning: Rör utan tillsats-röd kork, EDTA-rör- lila kork. Gelrör (gul kork) används ej.

Vingkanyl används ej pga. värmeförlust i den långa slangen.

Tillbehör: Värmebehållare

Gäller följande analyser: Blodstatus,B- SR-B Proteinprofil M-komponent,S-, Immunglobulin,S- samt Inflammation,S-.

- Provtagningsmateriel, provrör och kanyler, förvärms till 37°C cirka 15 min i värmeblock. Vingkanyl används ej pga. värmeförlust i den långa slangen. •
- Ta med värmeblocket till patienten. Ta kanylen från värmen precis innan provet tas. Vänd röret 5 ggr och sätt tillbaka det i värmeblocket omedelbart. Fortsätt med nästa rör. •
- Transportera prov i värmeblocket till Laboratoriemedicin snarast.

Efter att prov/en stått i värmeskåpet i 60 min centrifugeras det i värmecentrifug.

- Avpipettera med förvärm pipett och plaströr.
- Serumprovet hålls fortsatt varmt tills analys kan utföras, dvs immunprofilen. Värm hittachikoppen innan analys.

Blodstatus och sänka analyseras efter att ha stått 60 min. i värmeskåp.

Kryoglobuliner, följ metodbeskrivningen.